

REINIGUNG und PFLEGE

Damit Du viel Freude an Deiner Massageliege hast, beachte bitte folgende Reinigungs- und Pflegehinweise:

1

Reinigung der Liegefläche

Optimal für die Reinigung sind ein Lappen oder ein weicher Schwamm (bitte keinen Topfschwamm nutzen!) mit der Kombination aus Wasser, Geschirrspülmittel und einer Verschlusskappe Mulsifan Kaltmulgator (BODE), was ideal ist zum Entfernen klebriger Ölrückstände & anhaftenden Hautfetten.

ACHTUNG: Keine scharfen (aggressiven) Spezialfettlöser und ähnliches verwenden, da diese bzw. die Substanzen in ihnen die Oberflächen von PU-Leder-Massageliegen angreifen können.

2

Desinfektion von Liegenfläche & Kopfteil

Grundsätzlich sind milde Flächendesinfektionsmittel für eine hygienische und unkomplizierte Desinfektion der Liegefläche und des Kopfteils zu empfehlen – allerdings einschränkend nur solche, die auch für sensible Kunststoffe wie z.B. Acryl geeignet sind – z.B. von dem Hersteller BODE. Diese gibt es für die **Sprühdesinfektion** (Einsprühen, Einwirken und Abwischen) und die **Wischdesinfektion** (vorgetränkte Tücher, die direkt zum Abwischen der Oberflächen verwendet werden können)

3

Pflege des Liegengestells

Massageliegen aus Holz bzw. deren Massivholzuntergestelle sind im Prinzip zu nicht anders zu behandeln als Möbel. Bitte verwende nur einen feuchten Lappen mit einer Mischung aus Wasser & Spülmittel für die Entfernung von Staub oder kleinen Verunreinigungen.

ACHTUNG: Ölrückstände auf Holz bitte schnell entfernen, damit sich dunkle naturreine Öle nicht dauerhaft ins Holz prägen können. Die Reinigungswirkung kann grds. erhöht werden, wenn man in das Wischwasser eine Verschlusskappe Mulsifan Kaltmulgator (BODE) gibt.